간단설명서	 사용자의 PC의 CD-ROM 드라이브에 설치 CD를 삽입하거나 케어센스 제품 홈페이지에서 다운 받아 설치할 수 있습니다. 케어센스 제품 홈페이지: www.caresens.co.kr
SMART LOG	2. 프로그램 설치
스마트로그 혈당관리 프로그램 [한국어]	2.1 윈도우에 설치하기 INSTALL_SMARTLOG_2.X.X.EXE 파일을 더블클릭하면 설치화면이 실행 됩니다. 설치하시려면 파일 경로를 선택하시고 이어서 나오는 대화상자의 다음. 설치. 완료 버튼을 차례로 클릭 하십시오.
ᆇ ^{ᄪᆋ} ๛ ๛	● A 注 ② ? ▲
한글 프로그램 간단한 사용방법 편리한 USB 포트 사용 식사 시간 및 혈당 목표 다양한 분석리포트 리포트 출력 이메일 전송 사용자 지정	됩니니.
한글 프로그램 간단한 사용방법 편리한 USB 포트 사용 식사 시간 및 혈당 목표 다양한 분석리포트 리포트 출력 이메일 전송 사용자 지정 목차 1 설치시작 2 프로그램 설치	다니니. USB Serial Port(COM3) 정치 드라이버 소프트웨어가 성공적으로 설치되었습니 다. 주 A 漢 @ ? ~)) 지하다. 라는 메시지가 나타납니다.
한글 프로그램 긴단한 사용방법 판리한 LSB 프트 사용 식사 시간 및 활당 목표 대당한 분석리프트 리 포트 출격 이메일 전용 1 설치시작 1 설치시작 1 2 프로그램 설치 3 SmartLog 시작 1 4 사용자 5 데이터 받기 6 수통입력 7 7 보고서 인쇄 및 이메일 전송 9 데이터 관리 1	도 다 나 ************************************

1. 설치시작

2.2 맥킨토시에 설치하기

0000

	Welcome to the Install_SmartLog_2.1.0 Installer
Introduction Destination Select Installation Type Installation Summary	You will be guided through the steps necessary to install this software.
	Ge Back

• • 0	Install Install_SmartLog_2.1.0
	Standard Install on "MacHD"
Introduction	This will take 84.8 MB of space on your computer.
 Destination Select 	Click Install to perform a standard installation of this sof on the dick "MacUD"
Installation Type	on the disk 'Macho'.
 Installation 	
 Summary 	
	Go Back

	Installing Ins	stall_Sm	artLog_2.1.0	
troduct estinati stallatic stallati	Installer is your passw	trying to rord to a	o install new allow this.	software. Type
immary	Username: Password:	admin	Cancel	Install Software

3. SmartLog 시작
3.1 SmartLog 실행 PC(Windows) 버전에서는 바탕화면
더블클릭하고, MAC 버전에서는 응용
더블클릭하여 SmartLog 프로그램을
3.2 프로그램 화면

96 (170) 전체: 154(19)

12 시스템 요구사항

13 문제해결



INSTALL_SMARTLOG_2.X.X.PKG 파일을 더블 클릭하면 왼쪽과 같은 설치 화면이 실행됩니다. 화면에서 CONTINUE 를 누릅니다.

설치할 폴더를 선택한 후에 INSTALL을 눌러 진행합니다.



사용자 권한을 확인해야 설치 가능 합니다. 비밀번호 입력 후 설치를 시작 합니다.



5





SmartLog 프로그램이 실행된 화면 입니다.







3.3 측정기와 PC 연결

Pc

2-04 23 000

4. 사용자

PC의 USB 포트에 SmartLog 전용 케이블을 연결합니다.

혈당기 시리얼 번호



자 정보를 등록해야 합니다. [참고] 이름, 생년월일, 성별은 필수 입력 정보이므로 입력하지 않으면 사용자

PC에 측정기를 처음 연결하여 데이터를

측정기와 케이블을 연결합니다.

[참고] 미터에 따라서 이 단계에서 화면

측정기의 전원 버튼을 누르면, 측정기

화면에 Pc 메시지가 나타납니다.

에 Pc 메시지가 나타나기도 합니다.

등록을 할 수 없습니다.

측정기를 처음 연결했다면, 반드시 사용

면 사용자 정보 화면이 실행됩니다.





7



C	데이터 다운로드 완	관료 🛞
	혈당 데이터 수 : 6	
날짜	시간	혈당값(mg/dL)
2015-07-13	오후 3:17	242
2015-07-13	오후 3:16	242
2015-07-13	오후 3:16	216
2015-07-13	오후 3:15	219
2015-07-13	오후 3:14	219
2015-07-13	오후 3:13	219
혈당기 시간: 2015 시스템 시간: 2015	5-09-10 오후 5:01 5-09-10 오후 5:02	이간 동기화

사용자의 식사 및 취침 시간을 평일/휴일 을 구분하여 입력합니다. 하루를 8개의 구간으로 나누어 데이터를 관리합니다. (조식 전/후, 중식 전/후, 석식 전/후, 취침 전/새벽)

[주의] 입력한 구간과 실제생활이 일치하지 않으면 SmartLog로 전송된 혈당 기록이 부적절한 식사 시간대에 표시될 수 있습니다. 잘못된 식사 시간대에 목표혈당범위를 벗어난 기록이 표시되면, 데이터를 추적 및 정리할 때 정보를 잘못 해석할 수 있습니다.

아침 식사 전부터 새벽 시간대까지의 모든 기록은 아침 식사 전 시작시간 날짜에 따라 순차적으로 표시됩니다.

이동 경색				•
		이동을 입석해 주세요.		৭ ৪+
0	-	생년월일	성별	보험 번호
- HSE	NS			

조석정 요청 (06 슈): (00 슈) ~ 조석후 요청 (08 슈): (00 슈) ~

등록된 사용자를 검색하거나 삭제할 수

있습니다. 측정기를 연결하지 않아도 새 사용자를 추가할 수 있습니다.

5. 데이터 받기





대한 팝업 창이 실행됩니다. 시간 동기 **화** 버튼을 클릭하면 혈당 측정기의 시 간이 PC에 설정된 시간으로 변경됩니 다. **확인** 버튼을 클릭하면 완료됩니다.

다운 받습니다.



6. 수동입력









프로그램 메뉴의 수동입력 버튼을 클릭

하면, 수동입력 화면이 실행됩니다.

[참고] 혈당값은 10~600 mg/dL 혹은 0.6~33.3 mmol/L 범위 내에서 만 입력 할수 있습니다.

보고서	
<u>ılı.</u> (프로그램 메뉴의 리포트 버튼을 클릭하면, 보고서 화면이 실행됩니다.
리포트	





리포트 종류 선택 메뉴의 화살표를 클릭하여 다양한 보고서를 선택하여 볼 수 있습니다.



[혈당값 경향 그래프] 선택한 날짜 범위에 해당하는 일별 혈당 값이 표시됩니다



[평균 혈당값 분석] 식사/취침 시간대 및 요일별 혈당 평균값 이 표시됩니다.





Diabetes Management	Software	1512013-0	1-101M				
👍 🔟	리포트						
1824	간 비교 그래프	W	최근 60일	V		(1) - 2015	-09-10
~ 쓰 🧹	현재기간		· · · ·				
A84 8	42	400	2			7	1
ha. 👘 👘	소갈	70	2 339				
	영값	120	228	_	_		
day 1	준 변자	106,5	GI 136 BI			- Y	12
ୁଡ଼ିକ୍ ବ	경 뒷수	19	2315-07-13	2015-47-27	2015-00-11	2015-00-25	2015-4
98457	글값	154			2.8		
1011	이전기간						
د اس	FI12	258	2 440				
45.00 1	소값	78	2 339				
8	생값	114	5 238	- 1		_	_
	준 변자	34.7	20 136 8		Section from	- المجامع وي ال	
A	20月中	34	2018-05-14	2015-05-20	2015-06-12	2015-06-27	2015-4
					1/ 22		

값을 24시간으로 나누어 각 시간 별로 표시합니다.

[일별 경향 그래프]

목표분석]

각 식전 및 식후 목표치 범위에 대한 목표치 이상, 이하 및 이내 범위에 해당 하는 혈당 측정치 비율이 표시됩니다.

선택한 날짜 범위에 해당하는 일별 혈당

[기간 비교 그래프]

[당뇨수첩]

사용자가 선택한 현재기간과 이전기간에 대한 혈당값의 경향과 각종 통계값을 비교 확인할 수 있습니다.

설정한 각 시간대별로 날짜별 측정

데이터와 각종 통계값을 표로 보여줍니다.

80

8. 보고서 인쇄 및 이메일 전송

설정한 각 SmartLog 프로그램 사용 중 보고서 출력이나 이메일 전송을 원하시면 리포트 화면의 우측 상단에 있는 인쇄나 이메일 보내기 버튼을 클릭 하십시오, 날짜별 측정 데이터와 각종 통계값을 표로 보여줍니다.

9. 데이터 관리



13









[2주 요약 그래프]

최근 2주간 측정한 혈당값에 대해 혈당값 경향 그래프, 당뇨수첩의 혈당측정값통계 와 혈당기록보기 그래프가 표시됩니다.









[혈당값 리스트] 선택한 날짜 범위의 혈당값, 날짜, 시간, 메모 정보를 보여줍니다.

프로그램 메뉴의 다운로드/데이터 버튼을 클릭하면, 데이터 관리 기능을 사용할 수 있습니다.

SmartLog에 기록된 사용자 및 혈당데이 터를 보고서 형식으로 내보내기/불러오기 하거나 데이터베이스를 복원할 수 있습 니다.

15

16

프로그램 메뉴의 설정 버튼을 클릭하면 설정 화면이 나타납니다.





프로그램에 표시되는 언어, 날짜형식, 시간 형식, 혈당단위, 혈당목표를 설정할 수 있습

측정기의 단위를 반드시 일치 시키십시오. 단위를 변경할 경우 데이터를 읽을 때 심각한 오류를 범할 가능성이 있습니다.

미터가 않습니디

<u>프로그림</u> 되지 않

해결방법
1. SmartLog 프로그램이 이미 실행되어 있을 수도 있습 니다. 이러한 경우에는 작업표시줄에 표시된 SmartLog 아이콘을 클릭합니다.
 현재 실행 중인 모든 프로그램을 닫고 다시 실행해 봅니다.
3. 시스템을 재 부팅하고 다시 실행해 봅니다.
4. 위 방법으로 해결되지 않는 경우에는 SmartLog 프로 그램을 삭제하고 재설치합니다. 프로그램을 삭제하면 기존의 데이터가 모두 삭제되므로, 프로그램 삭제 전 고객센터(080-910-0600)로 문의해 주십시오.
 SmartLog 프로그램을 닫고 다시 실행해 보십시오. 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. SmartLog 이외에 다른 프로그램에 의해 COM port가 사용 중일 수도 있습니다. 다른 프로그램을 모두 닫고 다시 실행해 보십시오. 측정기의 배터리가 충분한지 확인하십시오. 배터리 표시가 깜박거린다면 배터리를 교체하고 다시 실행해

5. 시스템을 재 부팅하고 다시 실행해 봅니다.

13. 문제해결

프로그램 사용 중에 문제가 발생할 경우 아래의 조치사항을 참고하시기 바랍니다. 만약 아래의 내용으로 문제가 해결이 되지 않을 경우 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.

• Mac OS X 10.8 이상

• 스마트로그 전용 USB 케이블

• 이메일 전송을 위한 인터넷 연결

• 리포트 출력을 위한 프린터

• USB 포트

12. 시스템 요구사항 • CPU: 500MHz Intel Pentium III 이상 • RAM : 512 MB 이상

• Windows[®] XP Home 및 Professional (SP2 이상), Windows[®] Vista(32비트/64

96 (128) .

• 하드 디스크 최소 여유 공간 : 200MB

• 최소 1024x768 픽셀 화면 해상도 이상의 모니터

11. 도움말

SmartLog 프로그램 사용방법에 대해 더 많은 정보를 원하시면 처음으로 화면의 우측에서 매뉴얼을 클릭해서 확인 할 수 있습니다.



아이러브케어센스

'아이러브케어센스'를 검색해 보세요.

네이버에서 온라인 카페

다양한 이벤트에도 참여하실 수 있습니다.

제조원 :

17

18

(주)아이센스원주공장

강원도 원주시 문막읍 동화공단로 94-1

(고객상담실: 080-910-0600

© 2015 i-SENS, Inc. All Rights Reseved.

